

## INSTRUÇÕES DE USO



## CATETER DUPLO J – RUSSER

803 297 200 06

**INSTRUÇÕES DE USO**


**Cateter Duplo J - Russer**

**APRESENTAÇÃO**

Os Cateteres Duplo J Russer são fornecidos estéreis e apirogênicos. Os cateteres são embalados individualmente em blisters, constituídos de papel grau cirúrgico ou tyvek®, posteriormente são dispostos em embalagem secundária em caixa de papelão, de forma e tamanho adequado, a fim de conferir maior segurança durante o transporte e armazenamento até o momento do uso.

Acompanha o produto:

- 01 Cateter Duplo J - Russer
- 01 Empurrador
- 01 Fio Guia Teflonado (revestimento em PTFE) – Item opcional
- 01 Manual de Instruções

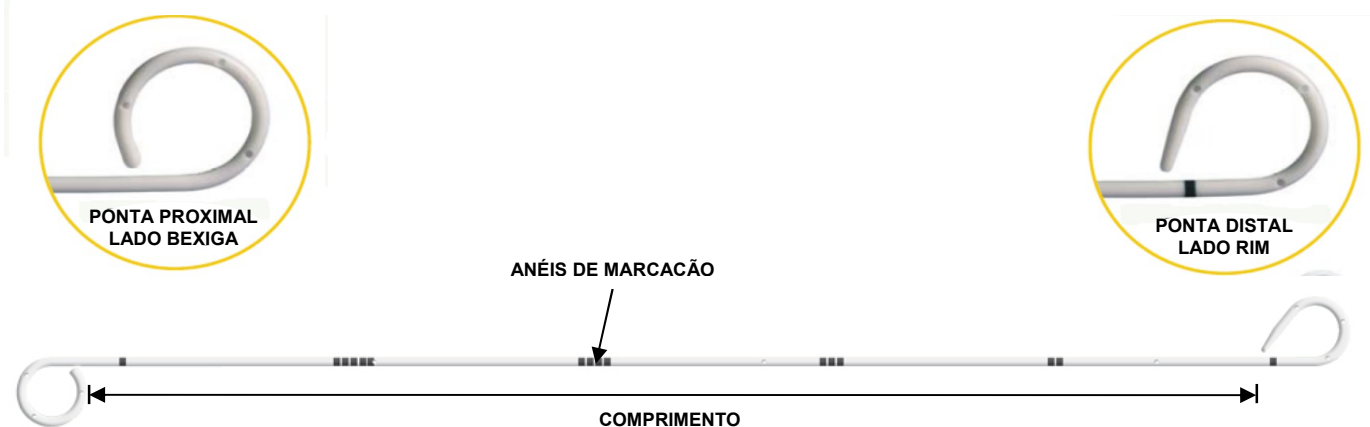

**MODELOS**

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EN-300308-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300310-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300312-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300314-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300315-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300316-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300318-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300320-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300322-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300324-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EN-300326-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300328-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300330-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300408-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300410-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300412-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300414-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300415-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300416-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300418-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300420-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300422-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300424-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300426-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300428-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300430-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304708-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304710-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304712-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304714-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304715-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304716-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304718-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304720-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-304722-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304724-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304726-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304728-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-304730-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300508-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300510-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300512-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300514-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300515-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300516-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300518-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300520-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300522-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300524-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300526-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300528-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300530-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300608-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 8cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300610-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300612-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300614-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028" /0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300615-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300616-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-300618-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300620-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" e de 125/150 cm comprimento
EN-300622-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-300624-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300626-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300628-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300630-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300708-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300710-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300712-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300714-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300715-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300716-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300718-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300720-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300722-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300724-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300726-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300728-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300730-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300808-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 08 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300810-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300812-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300814-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-300815-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300816-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300818-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300820-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300822-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300824-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300826-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300828-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300830-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300908-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300910-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300912-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300914-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300915-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300916-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300918-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300920-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300922-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300924-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300926-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300928-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-300930-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301008-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301010-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EN-301012-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301014-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301015-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301016-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301018-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301020-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301022-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301024-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301026-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301028-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-301030-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390308-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390310-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390312-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390314-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390315-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390316-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390318-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390320-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390322-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390324-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390326-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390328-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390330-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390408-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390410-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390412-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390414-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390415-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390416-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390418-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390420-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390422-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390424-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390426-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento



CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390428-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390430-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394708-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394710-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394712-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394714-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394715-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394716-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394718-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394720-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394722-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394724-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394726-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394728-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394730-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390508-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390510-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390512-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390514-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390515-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390516-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390518-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390520-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390522-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390524-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390526-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390528-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390530-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390608-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390610-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390612-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390614-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390615-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390616-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390618-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390620-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390622-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390624-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390626-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390628-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390630-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390708-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390710-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390712-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390714-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390715-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390716-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390718-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390720-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390722-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390724-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390726-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390728-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390730-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390808-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390810-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390812-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390814-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390815-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390816-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390818-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390820-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390822-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390824-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390826-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390828-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390830-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360308-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360310-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360312-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018" /0,025" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-360314-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018" /0,025" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-360315-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-360316-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018" /0,025" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-360318-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018" /0,025" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-360320-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-360322-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360324-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360326-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360328-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360330-F	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360408-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360410-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360412-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360414-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360415-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360416-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-360418-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360420-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360422-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360424-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360426-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360428-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360430-F	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364708-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364710-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio de guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364712-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364714-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" de 125/150 cm comprimento
EN-364715-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro de 125/150 cm comprimento
EN-364716-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364718-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364720-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364722-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364724-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364726-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364728-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364730-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360508-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360510-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360512-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360514-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-360515-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360516-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360518-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360520-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360522-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360524-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360526-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360528-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360530-F	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360608-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360610-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360612-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360614-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360615-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360616-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360618-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360620-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360622-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,028"/0,035" de 125/150 cm comprimento
EN-360624-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360626-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360628-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360630-F	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360708-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360710-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-360712-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360714-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360715-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360716-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360718-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360720-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360722-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" e de 125/150 cm comprimento
EN-360724-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360726-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360728-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360730-F	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360808-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360810-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360812-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360814-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360815-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360816-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360818-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360820-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360822-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360824-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360826-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360828-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360830-F	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento



<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-360908-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360910-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360912-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360914-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360915-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360916-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360918-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360920-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360922-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360924-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360926-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360928-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360930-F	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361008-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361010-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361012-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361014-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361015-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361016-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361018-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361020-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361022-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361024-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361026-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EN-361028-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-361030-F	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta, com fio guia de 0,035"/0,045" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360308-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360310-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360312-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360314-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360315-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360316-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360318-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360320-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360322-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360324-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360326-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360328-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360330-F	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,018"/0,025" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360408-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-360410-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360412-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360414-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360415-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360416-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360418-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360420-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360422-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360424-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360426-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360428-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360430-F	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364708-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364710-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364712-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364714-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-364715-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364716-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364718-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364720-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364722-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364724-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364726-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364728-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364730-F	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360508-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360510-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360512-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360514-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360516-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360518-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360520-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-360522-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360524-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360526-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360528-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360530-F	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360608-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360610-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360612-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360614-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360615-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360616-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360618-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360620-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360622-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360624-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360626-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-360628-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360630-F	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360708-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360710-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360712-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360714-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360715-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360716-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360718-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360720-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360722-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360724-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360726-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360728-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360730-F	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360808-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-360810-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360812-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360814-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360815-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360816-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360818-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360820-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360822-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360824-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360826-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360828-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360830-F	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta, com fio guia de 0,025"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-360724-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-360726-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-360728-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-360730-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-390724-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-390726-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EL-390728-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-390730-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360308-12-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-364721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-365208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-365222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-365221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360622-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360621-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-366208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-366222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-366221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-367322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-367321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360822-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-360821-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-368222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento



CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EN-368221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-368522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-368521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360308-12-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-364721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-365208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-365222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-365221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360622-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360621-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-366208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-366222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-366221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-367322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-367321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360822-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-360821-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, com fio ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-368222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-368221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-368522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-368521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390308-12-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-394722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-394721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EN-395208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-395222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-395221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390622-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390621-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-396208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-396222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-396221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-397322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-397321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390822-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-390821-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-398222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-398221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-398522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EN-398521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390308-12-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ponta fechada com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,018"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-394722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-394721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-395208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-395222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-395221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,028"/0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390622-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390621-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-396208-20-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-396222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-396221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390722-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390721-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-397322-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-397321-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-390822-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA
EC-390821-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, com fio ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-398222-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-398221-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-398522-30-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EC-398521-32-BS-F	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201226-P-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta proximal, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201228-P-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta proximal, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201230-P-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta proximal, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comp.
TU-201226-M-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta central, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201228-M-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta central, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201230-M-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta central, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201226-D-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta distal, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201228-D-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta distal, com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
TU-201230-D-F	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta distal com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-470724-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-470726-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-470728-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM FIO GUIA</b>
EL-470730-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-490724-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-490726-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-490728-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125/150 cm comprimento
EL-490730-F	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada com fio guia de 0,035" diâmetro e de 125 cm comprimento

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-300308	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300310	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300312	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300314	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300315	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300316	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300318	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300320	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300322	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300324	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300326	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300328	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300330	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300408	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300410	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300412	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300414	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300415	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300416	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300418	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300420	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300422	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300424	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300426	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300428	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300430	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304708	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304710	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304712	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304714	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304715	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304716	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada.
EN-304718	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-304720	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento,ponta fechada.
EN-304722	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento,ponta fechada.
EN-304724	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento,ponta fechada
EN-304726	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento,ponta fechada.
EN-304728	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento,ponta fechada
EN-304730	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300508	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 8 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300510	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 10 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300512	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 12 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300514	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 14 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300515	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 15 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300516	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 16 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300518	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 18 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300520	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 20 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300522	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 22 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300524	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 24 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300526	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 26 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300528	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 28 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300530	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 30 cm comprimento,ponta fechada
EN-300608	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 8 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300610	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 10 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300612	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 12 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300614	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 14 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300615	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 15 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300616	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 16 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300618	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 18 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300620	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 20 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300622	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 22 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300624	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 24 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300626	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 26 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300628	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 28 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300630	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 30 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300708	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 8 cm comprimento,ponta fechada
EN-300710	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 10 cm comprimento,ponta fechada
EN-300712	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 12 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300714	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 14 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300715	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 15 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300716	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 16 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300718	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 18 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300720	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 20 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300722	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 22 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300724	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300726	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300728	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento,ponta fechada
EN-300730	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300808	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 8 cm comprimento,ponta fechada.
EN-300810	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 10 cm comprimento,ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-300812	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300814	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300815	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300816	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300818	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300820	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300822	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300824	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300826	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300828	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300830	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300908	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300910	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300912	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300914	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300915	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300916	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300918	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300920	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300922	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300924	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300926	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300928	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EN-300930	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301008	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 8 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301010	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 10 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301012	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301014	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 14 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301015	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 15 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301016	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 16 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301018	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 18 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301020	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301022	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 22 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301024	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301026	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301028	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EN-301030	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.
EC-390308	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390310	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390312	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390314	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390315	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.



<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-390316	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390318	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390320	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390322	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390324	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada .
EC-390326	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390328	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390330	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390408	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390410	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390412	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390414	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390415	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390416	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390418	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390420	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390422	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390424	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390426	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390428	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390430	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394708	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394710	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394712	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-394714	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394715	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394716	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394718	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394720	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394722	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394724	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394726	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394728	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-394730	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390508	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390510	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390512	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390514	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390515	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390516	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390518	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390520	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390522	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390524	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390526	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390528	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390530	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390608	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 8 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-390610	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390612	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390614	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390615	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390616	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390618	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390620	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390622	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390624	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390626	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390628	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390630	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390708	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 8 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390710	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390712	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390714	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390715	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390716	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390718	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390720	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390722	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390724	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390726	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.
EC-390728	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-390730	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390808	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 8 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390810	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390812	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390814	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390815	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390816	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390818	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390820	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390822	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390824	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390826	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390828	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EC-390830	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada.
EN-360308	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360310	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360312	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360314	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360315	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360316	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360318	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360320	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360322	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360324	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360326	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360328	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360330	Catéter Ureteral duplo J, 3 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360408	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360410	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360412	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360414	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360415	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360416	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360418	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-360420	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360422	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360424	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360426	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360428	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360430	Catéter Ureteral duplo J, 4 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364708	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364710	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364712	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364714	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364715	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364716	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364718	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364720	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364722	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364724	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364726	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364728	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364730	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360508	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360510	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360512	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360514	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360515	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360516	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360518	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360520	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360522	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360524	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360526	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360528	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360530	Catéter Ureteral duplo J, 5 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360608	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360610	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360612	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360614	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360615	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360616	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360618	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360620	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360622	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360624	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360626	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360628	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360630	Catéter Ureteral duplo J, 6 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360708	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360710	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-360712	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360714	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360715	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360716	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360718	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360720	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360722	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360724	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360726	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360728	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360730	Catéter Ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360808	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360810	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360812	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360814	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360815	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360816	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360818	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360820	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360822	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360824	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360826	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360828	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360830	Catéter Ureteral duplo J, 8 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360908	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360910	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360912	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360914	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360915	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360916	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360918	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360920	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360922	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360924	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360926	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360928	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360930	Catéter Ureteral duplo J, 9 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361008	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 8 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361010	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 10 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361012	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361014	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 14 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361015	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 15 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361016	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 16 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361018	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 18 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361020	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361022	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 22 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361024	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-361026	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361028	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EN-361030	Catéter Ureteral duplo J, 10 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EC-360308	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360310	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360312	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360314	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360315	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360316	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360318	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360320	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360322	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360324	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360326	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360328	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360330	Catéter Ureteral duplo J, 03 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360408	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360410	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360412	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360414	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360415	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360416	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360418	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360420	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360422	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-360424	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360426	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360428	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360430	Catéter Ureteral duplo J, 04 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364708	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364710	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364712	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364714	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364715	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364716	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364718	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364720	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364722	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364724	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364726	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364728	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-364730	Catéter Ureteral duplo J, 4.7 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360508	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 08 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360510	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360512	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360514	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360515	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360516	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360518	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.



<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-360520	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360522	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360524	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360526	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360528	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360530	Catéter Ureteral duplo J, 05 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360608	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 8 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360610	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360612	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360614	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360615	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360616	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360618	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360620	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360622	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360624	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360626	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360628	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360630	Catéter Ureteral duplo J, 06 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360708	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 8 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360710	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360712	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360714	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.
EC-360715	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada,ponta aberta.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-360716	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360718	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360720	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360722	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360724	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360726	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360728	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360730	Catéter Ureteral duplo J, 07 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360808	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 8 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360810	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 10 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360812	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360814	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 14 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360815	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 15 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360816	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 16 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360818	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 18 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360820	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360822	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 22 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360824	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 24 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360826	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 26 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360828	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 28 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EC-360830	Catéter Ureteral duplo J, 08 FR, 30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta.
EL-360724	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EL-360726	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EL-360728	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EL-360730	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EL-390724	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EL-390726	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EL-390728	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EL-390730	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-360308-12-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-364721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-365208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-365222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-365221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360622-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360621-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-366208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta aberta.
EN-366222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-366221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-367322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-367321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360822-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-360821-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EN-368222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-368221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-368522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta aberta.
EN-368521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta aberta.
EC-360308-12-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta .
EC-360322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta .
EC-360321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-364722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-364721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-360522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta aberta
EC-360521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-365208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-365222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-365221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-360622-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-360621-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-366208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-366222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-366221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-360722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-360721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-367322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-367321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta aberta
EC-360822-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta aberta
EC-360821-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, com fio ponta aberta
EC-368222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-368221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EC-368522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta aberta
EC-368521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta aberta
EN-390308-12-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-394722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-394721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-395208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-395222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-395221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390622-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390621-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-396208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, ponta fechada.
EN-396222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-396221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-397322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-397321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390822-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-390821-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EN-398222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-398221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada.
EN-398522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, ponta fechada.
EN-398521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, ponta fechada
EC-390308-12-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 08-12 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-390322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-390321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-394722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-394721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 4.7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-390522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta fechada
EC-390521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-395208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-395222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-395221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 5.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-390622-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-390621-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-396208-20-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 08-20 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-396222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-396221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 6.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-390722-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-390721-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-397322-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-397321-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 7.3 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada , ponta fechada
EC-390822-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta fechada

<b>CÓDIGOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO SEM FIO GUIA</b>
EC-390821-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, com fio ponta fechada
EC-398222-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-398221-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.2 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
EC-398522-30-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 22-30 cm comprimento, com fio para colocação e retirada ,ponta fechada
EC-398521-32-BS	Catéter ureteral duplo J, multi voltas, 8.5 FR, 21-32 cm comprimento, com fio para colocação e retirada, ponta fechada
TU-201226-P	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-201228-P	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-201230-P	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta proximal.
TU-201226-M	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta central.
TU-201228-M	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta central.
TU-201230-M	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta central.
TU-201226-D	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta distal.
TU-201228-D	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta distal.
TU-201230-D	Catéter ureteral duplo J,7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta e com 12 Fr de dilatação na ponta distal.
EL-470724	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta aberta.
EL-470726	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta aberta.
EL-470728	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta aberta.
EL-470730	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta aberta.
EL-490724	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 24 cm comprimento, ponta fechada.
EL-490726	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 26 cm comprimento, ponta fechada.
EL-490728	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 28 cm comprimento, ponta fechada.
EL-490730	Catéter ureteral duplo J, 7 FR, 30 cm comprimento, ponta fechada.

## COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cateter ureteral duplo J fabricado em poliuretano;
- Empurrador, fabricado em Poliamida, tem a função de empurrar o catéter até a posição correta;
- Item Opcional - Fio guia teflonado (PTFE), reta, ponta rígida, extremidade flexível, ponta atraumática, diâmetros de 0,025' (0,63mm), 0,028' (0,71mm), 0,035' (0,88mm) e 0,045'(1,14mm) todos com 125 cm comprimento.

## INDICAÇÃO

- Estenose do ureter causado por, entre outros, um linfoma maligno, metástases retroperitoneais, doenças malignas do estômago, bexiga e próstata e doenças infecciosas;
- Proteção profilática na gravidez;
- Pós-operatório, entre outros, após uma operação de cálculo renal, pieloplastia e ureterotomia;
- Pré-operatório antes de grandes intervenções de stents vasculares;
- Pré-operatório na litotripsia por onda de choque, para pedras superiores a 25 mm;
- Em defeitos extensíveis ao ureter deve ser feita uma nefrostomia percutânea, uma vez que existe o perigo de aumentar mais uma lesão ao tentar manusear cegamente o cateter.

## CONTRA INDICAÇÕES

- Infecções graves;
- Obstrução persistente;
- Bexiga fibrosa;
- Urosepsis (em geral, septicemia da urina);
- Incontinência por urgência;
- Retenção crônica da urina;
- Obstrução extrínseca.

## PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Não use o cateter se sua embalagem tiver sido aberta ou danificada.
- Depois do uso, dispor do produto e embalagem de acordo com as normas hospitalares locais para produtos contaminantes.
- Os conjuntos deverão apenas ser utilizados por médicos experientes na utilização deste tipo de dispositivo.
- A análise da urina e as verificações da localização do cateter e da drenagem devem ser realizadas a intervalos regulares, de modo a assegurar um funcionamento correto.
- Para garantir um bom funcionamento do cateter duplo J - Russer, é necessário efetuar exames de controle regulares (estado da urina, posição do cateter duplo J, oclusões, drenagem, etc). Existindo uma infecção das vias urinárias o cateter duplo J pode incrustar e ocluir rapidamente.
- A inflamação do canal urinário pode provocar uma incrustação e obstrução mais rápidas do cateter
- Utilize o cateter antes da data de vencimento da esterilização, inscrita no rótulo.
- **Os metabólitos dos medicamentos ou as substâncias coloridas presentes na urina podem manchar os cateteres. No entanto, o desempenho funcional não é afetado por estas alterações de cor.**
- Verifique se existe alguma violação no lacre da embalagem, se dano ou abertura no lacre for detectado, a esterilização pode estar comprometida e o dispositivo deve ser descartado.
- Verifique a data do vencimento da esterilização do dispositivo. Nunca use produtos com data de validade vencida.
- Verifique os cateteres antes de usar, caso ocorra alguma irregularidade, descarte o dispositivo e troque por um novo.
- Usar o dispositivo com danos físicos ou funcionais pode resultar em ferimentos ao paciente ou/e usuário.

**PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO.**  
**Descartar após o uso.**  
**PROIBIDO REPROCESSAR.**



---

## **POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS RELACIONADOS AO USO DO CATÉTER**

- Infecção ascendente
- Aumento da frequência de micção
- Disúria
- Cólica renal
- Hematúria
- Irritação do rim e bexiga causada por corpos estranhos

## **INSTALAÇÃO E MONTAGEM**

As instruções presentes neste manual tem caráter orientativo. Este manual não substitui treinamentos ou cursos de intervenção cirúrgica.

## **DESEMBALAGEM**

Retirar cuidadosamente o Cateter duplo J - Russer da embalagem de transporte, não retirar abruptamente para não causar danos.

## **ORIENTAÇÃO PARA USO CORRETO E SEGURO**

O Cateter Duplo J - Russer deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados e qualificados para o procedimento.

Durante os procedimentos cirúrgicos deve evitar esforços excessivos, que podem acarretar ruptura do dispositivo.

Antes de utilizar o dispositivo verificar se a embalagem não está danificada ou aberta, caso ocorra, descarte imediatamente o produto.

## **INSTRUÇÕES DE USO – MÉTODOS DE APLICAÇÃO DO PRODUTO**

**Observação: Inspeção cuidadosamente o cateter para verificar se existem dobras, torções ou outros danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Não utilize um produto não conforme.**

Colocação do Cateter duplo J – Russer

- Introduzir o fio guia com a ponta flexível pelo cistoscópio, passar pela obstrução até chegar na pelve renal – Figura 1;
- Com o fio guia posicionado, sob controle radioscópico, introduzir o cateter duplo J com o auxílio do empurrador, até a pelve renal – Figura 2;
- Quando a ponta do cateter distal alcançar a pelve renal, parar de introduzi-lo. O fio guia deve ser removido, enquanto o empurrador mantém o cateter duplo J na sua posição. O cateter vai se formar espontaneamente a sua forma original (ponta J) – Figura 3;
- Remover cuidadosamente o empurrador do cistoscópio.

**Fig.1****Fig.2****Fig.3**

## **POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES E/OU RISCOS**

As complicações que podem resultar a partir do uso do cateter em um procedimento incluem:

- Deslocamento do cateter ureteral;
- Incrustação e obstrução do cateter ureteral bem como o seu deslocamento pode impedir o seu funcionamento e causar a formação de cálculos no rim;
- A introdução do cateter duplo J com o fio guia sobre os obstáculos interferentes pode causar danos ao ureter;
- A retração do fio guia com o Cateter duplo J e uma posterior reintrodução pode fazer com que a ponta do fio guia saia do encaixe do Cateter duplo J podendo causar dano ao dispositivo e lesões na área do ureter;
- A introdução do cateter com o empurrador com muita força pode causar lesões nas paredes da bexiga.

## **ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO**

O Produto deve ser mantido em temperatura ambiente, livre de umidade, protegido contra luz e de choques mecânicos.

## **DESCARTE**

Depois do uso, o dispositivo não pode ser reutilizado, deve ser descartado conforme as normas hospitalares para produtos potencialmente perigosos. O manuseio e sua eliminação devem estar de acordo com os procedimentos médicos reconhecidos, com as normas e diretivas legais em vigor e conforme as normas hospitalares para produtos potencialmente perigosos.

## **ESTERILIZAÇÃO**

Os produtos da Russer são esterilizados por Óxido de Etileno, de acordo com as normas ISO 11135 (Esterilização de produtos para saúde).

**SIMBOLOGIA UTILIZADA - ROTULAGEM**



Atenção! Consultar documentos  
acompanhantes



Esterilizado por óxido de etileno



Modelo e/ou Código do produto



Data de Fabricação



Nº de lote



Data de Validade

**ATENDIMENTO AO CLIENTE**

Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso Atendimento ao Cliente (0800 17 0007).

**PRODUTO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO - DESCARTAR APÓS O USO  
PROIBIDO REPROCESSAR.  
PRODUTO ESTÉRIL.**

**Fabricado e distribuído por:**

Russer Brasil Ltda  
Rua Antonia Martins Luiz nº 589  
Distrito Industrial João Narezzi  
Indaiatuba / SP  
Fone: (19) 3825-9900  
SAC: 0800 17 0007

**Registro ANVISA nº:** 803 297 200 06

**Representante Legal:** Juan Ruben Calbucoy Oliarte

**Responsável Técnico:** Carlos Roberto Weffort – CREA-SP: 060155940-1